




CastorTM

Sistema di Endoprotesi Toracica Ramificata

Castor è un dispositivo custom made per il trattamento di pazienti specifici.
Per questo motivo, non ha il marchio CE e può essere fornito solo su base nominativa.


Serve l'Arco, Preserva la branca

Serve l'Arco, Preserva la branca

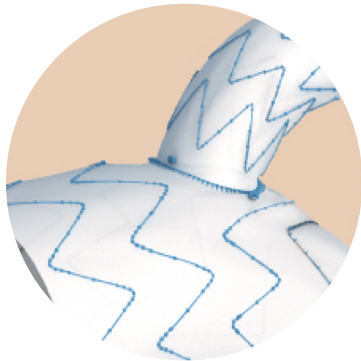


Design Unico Monocorpo

Riduce il rischio di endoleaks di Tipo III e Migrazione

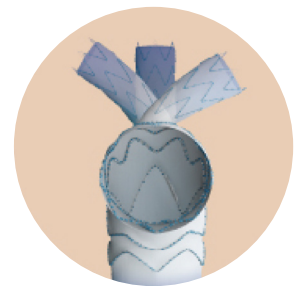


Angoli Multidimensionali

Consente l'orientamento della branca all'anatomia della succlavia di sinistra

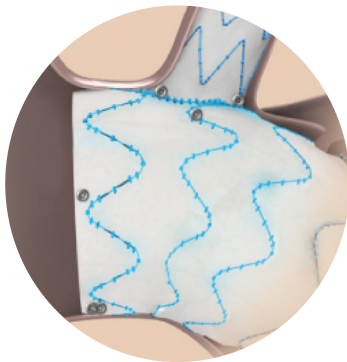


Serie di Mini Stent Prossimali

Si adattano all'arco aortico

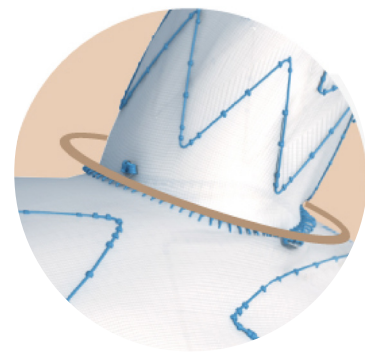


Anello di Supporto alla Base della branca

Fornisce supporto e migliora la plevietà della branca

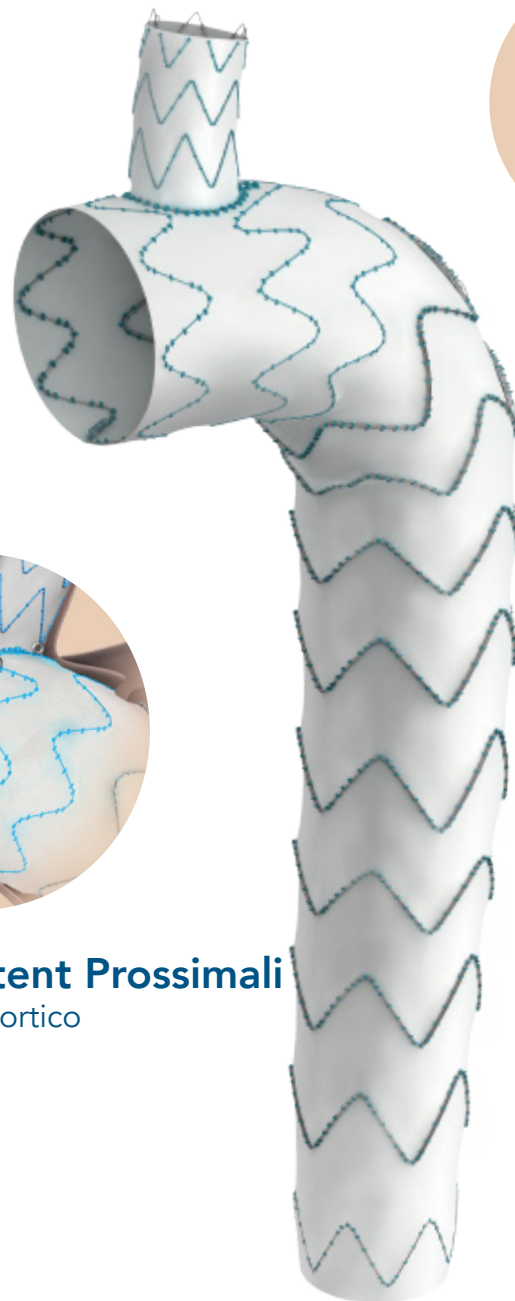


Opzioni di Branca

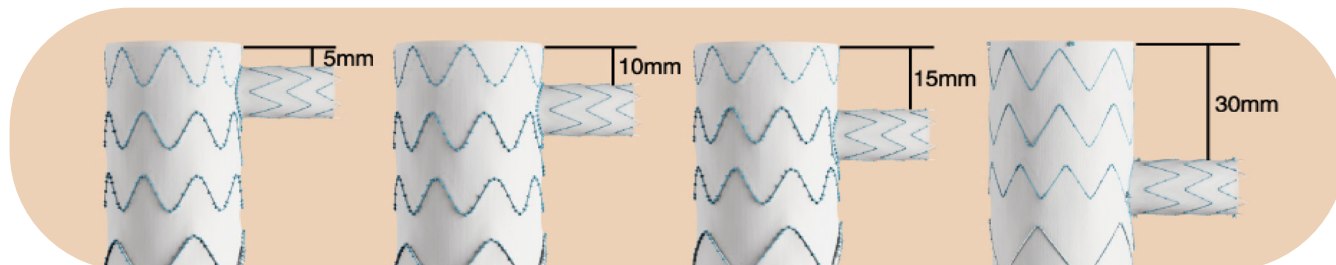


Lunghezza Estesa di 5-30mm dall'estremità prossimale del Corpo Principale alla Branca


Tecnica d'Impianto

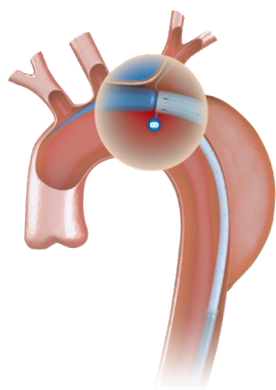


Attraversare l'arco aortico con la protezione della guaina interna morbida

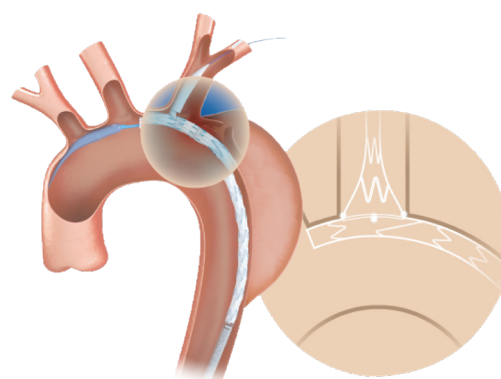

Manovrare la branca per regolare l'orientamento e la posizione

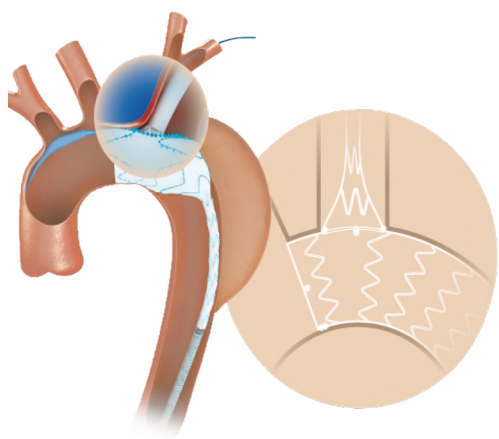

Tirare il filo di rilascio del corpo principale per ottenere un posizionamento preciso

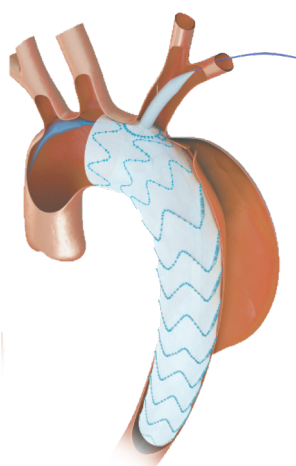

Rilasciare la Branca all'interno dell'arteria succlavia di sinistra



Completare il rilascio alla posizione finale


Specifiche del Prodotto

Specifiche del Modello

C	D1	D2	D3	-	L1	L2	L3
---	----	----	----	---	----	----	----

Lunghezza Estesa dall'estremità prossimale del Corpo Principale alla Branca
Lunghezza della Branca
Lunghezza del Corpo Principale
Diametro Distale della Branca
Diametro Distale del Corpo Principale
Diametro Prossimale del Corpo Principale
Castor™

Esempio: C322610-2003010

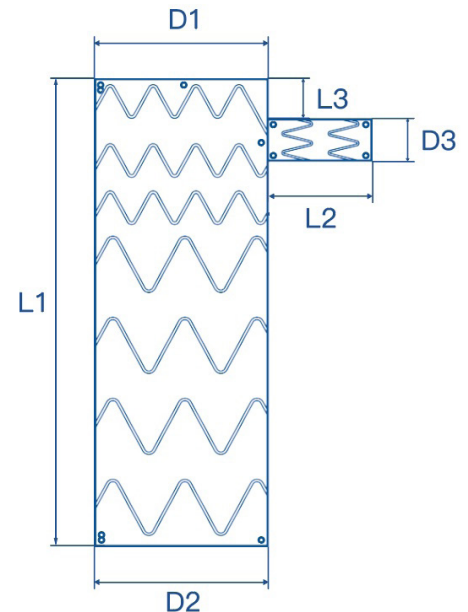

Specifiche del Prodotto

Specifiche del Modello (mm)	Dimensioni possibili
Diametro Prossimale del Corpo Principale (D1)	26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
Diametro Distale del Corpo Principale (D2)	20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44
Possibilità di Conicità	0 / 2 / 4 / 6 / 8
Diametro Distale della Branca (D3)	6 / 8 / 10 / 12 / 14
Lunghezza del Corpo Principale (L1)	100 / 120 / 150 / 170 / 180 / 200 / 210
Lunghezza della Branca (L2)	25 / 30
Lunghezza Estesa dall'estremità prossimale del Corpo Principale alla Branca	5* / 10 / 15 / 20 / 25 / 30
Profilo della Guaina Esterna (F)	24

* La lunghezza esatta della conformazione da 5mm è 7mm, tutte le altre conformazioni rappresentano la lunghezza esatta

Castor™ è un dispositivo custom-made per il trattamento di pazienti specifici.
Per questo motivo, non ha il marchio CE e può essere fornito solo su base nominativa.
Contattare il rappresentante di zona per confermare la fattibilità della configurazione richiesta



Lombard Medical Limited, Lombard Medical House, 4 Trident Park, Didcot, OX11 7HJ
Tel: +44 (0)1235 750800 Email: globalinfo@lombardmedical.com Website: www.lombardmedical.com

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari nei rispettivi Paesi. Questi dispositivi devono essere utilizzati esclusivamente da un medico autorizzato. Indicazioni, controindicazioni, avvertenze, potenziali eventi avversi e istruzioni per l'uso si possono trovare nelle istruzioni per l'uso e nell'etichetta del prodotto fornita con ciascun dispositivo. La promozione, distribuzione o la vendita di questi dispositivi è vietata nei paesi in cui non sono stati ottenuti i certificati di registrazione o altre licenze. Questa brochure è destinata all'uso da parte delle persone a cui è stata fornita e non deve essere distribuita in modo diffuso come pubblicità. Tutte le informazioni possono essere modificate senza preavviso. Castor™ è prodotto da MicroPort Endovastec e distribuito in Europa da Lombard Medical Limited. Non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti. ©2024 Lombard Medical Limited. All rights reserved. MP00013D_IT